



CM Médical a été fondé en 2015 par Christophe Micheau, détenteur d'un diplôme universitaire de stérilisation en milieu hospitalier et industriel, et actif dans le secteur dentaire depuis 1985. Depuis sa création, CM Médical est étroitement lié à l'entreprise Gamasonic, leader sur le marché des cuves et laveurs-désinfecteurs par ultrasons.

CM Médical est le distributeur exclusif de Gamasonic dans l'ouest de la France, en Espagne et au Portugal.

Durant ces trente-cinq années passées au contact des acteurs du médical, Christophe Micheau fait le constat des mauvaises pratiques liées à la stérilisation et à la lubrification des pièces à main. C'est ainsi qu'il décide de créer STERILUB® afin de respecter les bonnes pratiques de stérilisation en cabinets dentaires et dans le milieu hospitalier.



© Castres Mazamet Technopole

CONTACT

✉ contact@sterilub.com

☎ +33 7 85 57 77 94
+33 5 63 72 04 64

Retrouvez plus d'informations sur :

🔗 <https://sterilub.com/>



STERILUB®

par CM MEDICAL

Système révolutionnaire de
lubrification préservant la stérilité
des instruments de chirurgie



YSONIC
GAMASONIC - France

LES RÈGLES DE STÉRILISATION ENFIN RESPECTÉES

Tous les experts de la santé le savent : on ne stérilise que ce qui est propre et sec. Mais alors pourquoi lubrifier les pièces à main et contre-angles de stomatologie et de dentisterie avant la stérilisation ?

Avec STERILUB® on ne stérilise que ce qui est propre et sec, car la lubrification stérile des pièces à main et contre-angles est réalisée au bloc juste avant l'intervention chirurgicale.

SACHETS STÉRILES PRÉSERVÉS


Les différentes phases de vide de l'autoclave aspirent la quasi-totalité de l'huile contenue dans les pièces à main et contre-angles de chirurgie. Les sachets tachés après autoclave en témoignent.

Grâce à STERILUB® les sachets stériles des pièces à main et contre-angles ne sont plus tachés.


STERILUB®

par CM MEDICAL


LA MONODOSE DE LUBRIFIANT STÉRILE

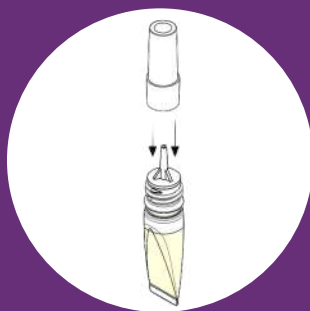

Insérez
l'embout adaptateur

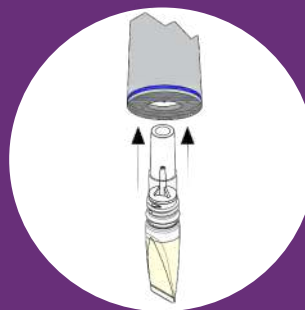

Insérez l'ensemble à
l'arrière du PID

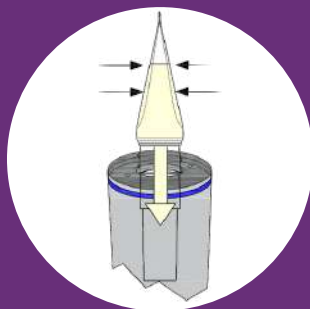

Pressez 2 fois pour
vider la monodose
... et utilisez !

LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT ET DU PRATICIEN

La montée en température de l'huile au contact de la vapeur d'eau crée une émulsion qui, en se solidifiant au séchage, empêche la bonne lubrification des instruments.

STERILUB® est plus confortable et sécurisant pour le patient et le praticien. En effet, les risques de surchauffe et de casse disparaissent car la lubrification se fait directement au bloc opératoire de façon totalement aseptique.

LA DURÉE DE VIE DES INSTRUMENTS PROLONGÉE

Les fréquentes réparations des pièces à main et contre-angles sont très onéreuses.

STERILUB® permet une économie très importante sur les coûts d'entretien, et rallonge la durée de vie des pièces à main et contre-angles.

Embout universel
Monodose fabriquée avec 50%
de recyclé, 100% recyclable
Brevet déposé à l'international
DM Classe 1S marquage  0476

